

Kurzanleitung zur Nutzung des Testmodells Genrui

1. Mit der Spitze die Folie des Teströhrchens durchstechen und das Teströhrchen ablegen
2. Tupfer zwei cm in Nase führen und pro Nasenloch mind. 5 mal in kreisförmiger Bewegung pinseln (mind. 15 Sekunden)
3. Tupfer in Flüssigkeit geben, Röhrchenwand zudrücken und Tupfer 5-6 Mal gegen Röhrchenwand drehen
4. Probe mit Tupfer 1 Minute einwirken lassen
5. nach einer Minute Tupfer an der Röhrchenwand ausdrücken
6. Röhrchen zehnmal schütteln
7. 3-4 Tropfen in das Probeloch tropfen
8. Ergebnis innerhalb von 15 - 20 Minuten ablesen - Das Testergebnis soll nach über 20 Minuten nicht mehr abgelesen werden

